

# STERANIOS 2%

STERANIOS 2% NG STERANIOS 2% ECS STERANIOS 20% Concentré

## BANDELETTES DE CONTROLE DU TAUX DE GLUTARALDEHYDE

### INDICATIONS

Contrôle du taux de Glutaraldéhyde actif au sein des solutions de désinfection totale à froid.  
STERANIOS 2%  
STERANIOS 2% NG  
STERANIOS 2% ECS  
STERANIOS 20 % CONCENTRE

### MODE D'EMPLOI

- Tremper totalement le papier indicateur dans la solution à tester pendant 1 seconde.
- Eliminer l'excès de solution par une légère agitation de la bandelette.
- Lire le résultat 15 secondes après trempage. Respecter le délai avant interprétation.

### COMPOSITION

Bandelettes imprégnées d'un réactif spécifique au glutaraldéhyde.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Conserver le flacon fermé entre + 4°C et +30°C dans un endroit sec. Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Si ces conditions sont respectées, les bandelettes sont utilisables jusqu'à la date de péremption indiquée sur la boîte.

## TESTING STRIPS OF GLUTARALDEHYDE RATE

### INDICATIONS

Control of reactive Glutaraldehyde level in cold sterilization solutions :  
STERANIOS 2%  
STERANIOS 2% NG  
STERANIOS 2% ECS  
STERANIOS 20% CONCENTRE

### INSTRUCTION FOR USE

- Totally soak the indicating paper in the solution to be tested during 1 second.
- Shake off excess liquid.
- Read after 15 seconds. Do respect this time before reading.

### COMPOSITION


Test strips impregnated with reactive agent specific to glutaraldehyde.

### STORAGE CONDITIONS

Keep the flask firmly closed at a temperature between +4°C and +30°C, in a dry area. Store away from light and moisture.

If these conditions are respected, testing strips are usable until the deadline indicated on the box.

Rose uniforme :  
CONFORME

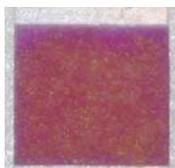

Evenly pink-coloured :  
COMPLYING

Orange ou Orange avec  
bordures roses :  
NON CONFORME



Orange or Orange and pink-coloured edge :  
WRONG