

	<b>Marque :</b>	
	<b>Classe CE :</b>	I, non stérile
	<b>Durée de vie :</b>	3 ans
	<b>Année de mise sur le marché :</b>	2002 en France
	<b>Code CLADIMED :</b>	M50CC02
	<b>Code CND :</b>	/
	<b>Code GMDN :</b>	41039
	<b>Version :</b>	E
	<b>Date :</b>	25/05/2021

## DONNEES PRODUIT

### Description

Collier cervical de type C1 en mousse.

### Caractéristiques

- Collier cervical composé d'une mousse de forme anatomique recouverte de jersey coton non traumatisant et d'une fermeture auto-agrippante.
- Les colliers cervicaux Actimove® Cervical sont disponibles en deux densités, semi-ferme et ferme, adaptés à un maintien plus ou moins fort de la région cervicale ainsi qu'en plusieurs tailles.
- Formule sans latex, sans phtalates.

### Composition

Coton (jersey), polyuréthane (mousse, densité 24 ou 31 kg/m<sup>3</sup>), polyamide (attache).

### Contrôles des matières premières et des produits finis

Effectués par le fabricant.

### Conditionnement / Stérilisation

Présentation unitaire avec notice d'utilisation. Les mesures correspondent à la hauteur et à la circonférence du cou. Pour le confort et l'hygiène du patient, une enveloppe supplémentaire en jersey coton est livré avec le collier cervical. Produit livré non stérile.

### Références

Présentations sans vignette de remboursement - [Mousse semi ferme](#)

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Taille	Hauteur cou	Circonférence cou	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809016062	72819-25	72819-25	XS	6,5 cm	26 – 33 cm	1	60	
4042809016093	72819-26	72819-26	S	7,5 cm	30 – 36 cm	1	60	
4042809016123	72819-27	72819-27	M	9 cm	33 – 39 cm	1	60	
4042809016154	72819-28	72819-28	L	10 cm	36 – 42 cm	1	40	
4042809016185	72819-29	72819-29	XL	11 cm	39 – 45 cm	1	40	
4042809016215	72819-30	72819-30	XL-Court	7 cm	38 – 48 cm	1	50	

Présentations sans vignette de remboursement - **Mousse ferme**

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Taille	Hauteur cou	Circonférence cou	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809016246	72819-31	72819-31	XS	6,5 cm	26 – 33 cm	1	60	
4042809016277	72819-32	72819-32	S	7,5 cm	30 – 36 cm	1	60	
4042809016307	72819-33	72819-33	M	9 cm	33 – 39 cm	1	40	
4042809016338	72819-34	72819-34	L	10 cm	36 – 42 cm	1	40	
4042809016369	72819-35	72819-35	XL-Court	7 cm	38 – 48 cm	1	50	

Présentations avec vignette de remboursement - **Mousse semi ferme**

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Taille	Hauteur cou	Circonférence cou	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809016062	73421-02	72819-25	XS	6,5 cm	26 – 33 cm	1	60	7140260
4042809016093	73421-03	72819-26	S	7,5 cm	30 – 36 cm	1	60	7140260
4042809016123	73421-04	72819-27	M	9 cm	33 – 39 cm	1	60	7140260
4042809016154	73421-05	72819-28	L	10 cm	36 – 42 cm	1	40	7140260
4042809016185	73421-06	72819-29	XL	11 cm	39 – 45 cm	1	40	7140260
4042809016215	73421-07	72819-30	XL-Court	7 cm	38 – 48 cm	1	50	7140260

Présentations avec vignette de remboursement - **Mousse ferme**

Code EAN13	Code Produit	Code sur l'emballage	Taille	Hauteur cou	Circonférence cou	Unité de commande	Unités par carton standard	Code LPPR
4042809016246	73421-08	72819-31	XS	6,5 cm	26 – 33 cm	1	60	7140260
4042809016277	73421-09	72819-32	S	7,5 cm	30 – 36 cm	1	60	7140260
4042809016307	73421-10	72819-33	M	9 cm	33 – 39 cm	1	40	7140260
4042809016338	73421-11	72819-34	L	10 cm	36 – 42 cm	1	40	7140260
4042809016369	73421-12	72819-35	XL-Court	7 cm	38 – 48 cm	1	50	7140260

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Stocker en milieu propre et sec, à l'abri de l'humidité et de la lumière directe du soleil.

## INDICATIONS / CONTRE INDICATIONS

### Indications

Syndrome cervical douloureux, aigu ou chronique (arthrose cervicale, torticolis, entorse cervicale bénigne...).

### Contre-indications

Aucune connue.

## CONSEILS D'UTILISATION

### Mode d'emploi

Le collier cervical Actimove® Cervical préformé est destiné à épouser les contours du cou.

- 1- Placer le collier devant le cou et faire reposer le menton dans la découpe prévue à cet effet.
- 2- Enrouler le collier autour du cou et fermer à l'aide de l'attache auto-agrippante.

### Précautions d'emploi

- Mise en place initiale par un professionnel de santé ou personnel formé.
- Mesurer la hauteur et la circonférence du cou afin de choisir le collier cervical adapté et éviter toute tension excessive.
- Ne pas trop serrer le collier afin de ne pas entraver la respiration.

### Particularités d'utilisation

- En cas de décoloration de la peau, d'hyperhydrose ou d'un sentiment d'inconfort, enlever le collier cervical et consulter votre médecin.
- Veiller à ce que les plaies recouvertes par le collier cervical soient protégées par un pansement approprié.

### Accessoires associés

Actimove® Physiopack®, poche pour application de froid et/ou de chaleur peut être utilisée en complément.

### Entretien

Fermer l'attache auto-agrippante. Laver en machine à 30°C (cycle délicat) ou à la main, à l'eau tiède à l'aide d'un savon doux. Rincer abondamment. Ne pas utiliser d'eau de javel. Ne pas nettoyer à sec. Laisser sécher à température ambiante. Ne pas repasser. Ne pas utiliser de sèche-linge. S'assurer que le collier est complètement sec avant de l'utiliser de nouveau.

L'enveloppe en jersey amovible permet un nettoyage plus fréquent.

## INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

### Autorisation de marquage CE

Déclaration de conformité effectuée par le fabricant légal.

### Remboursement

Conforme à la LPPR.

### Procédés de destruction

Incinération contrôlée ou mise en décharge, selon la réglementation locale.

Distributeur	Fabricant légal
BSN-RADIANTE SAS 57 Boulevard Demorieux F-72000 Le Mans Service Clients : 02 43 83 40 40 Matériorvigilance : 06 43 97 81 02 Site certifié ISO 13485 & 14001	BSN medical GmbH Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg Allemagne Site certifié ISO 13485