

## → Urgences/réanimation/premiers secours

Ces masques faciaux de réanimation permettent l'administration d'oxygène et de gaz anesthésiants délivrés par des appareils d'anesthésie. Ils peuvent être utilisés chez des patients respirant spontanément ou pour assurer une ventilation contrôlée.

La méthode d'application la plus commune du masque est la suivante : la main gauche saisit le masque, le pouce et l'index se posent sur le corps du masque de chaque côté du connecteur et assurent une pression pour appliquer le masque sur le visage du patient.

① Masque de réanimation souple 26/120kg, couleur jaune (petit adulte/adulte moyen/grand adulte).

② Masque de réanimation souple 10/26 kg, couleur blanche (enfant/petit adulte).

③ Masque de réanimation souple 0/10 kg, couleur grise (nouveau-né/nourrisson/enfant).

④ Canules de Guedel ISO 10.0/9.0/8.0/6.5 (sans PVC).

La canule est un dispositif destiné à être introduit dans la cavité buccale pour maintenir la liberté des voies aériennes et éviter la morsure des dispositifs médicaux d'intubation, d'aspiration ou d'exploration et la chute de langue vers l'arrière.

La canule se positionne par rotation (non recommandée chez l'enfant de moins de 8 ans) : introduire la canule en orientant sa concavité en direction de la tête du patient pour ne pas repousser la langue vers l'arrière. Une fois dans la cavité buccale, pratiquer une rotation de 180° tout en poursuivant l'introduction jusqu'à ce que la bague terminale soit en contact avec l'arc dentaire.



① Masque de réanimation souple  
petit adulte/adulte moyen/  
grand adulte

CE  
0120



② Masque de réanimation souple  
enfant/petit adulte



③ Masque de réanimation souple  
Nouveau-né/nourrisson/enfant

④ Canules de Guedel ISO



CE

### Caractéristiques

Le masque quadralite est un masque d'anesthésie souple et confortable :

- Sa forme anatomique unique combinée à une lèvre souple suffit à créer une excellente étanchéité là où des masques conventionnels à bourrelet nécessiteraient 6/7 tailles.

- Deux matériaux innovants permettent d'offrir qualité de souplesse et de confort optimal.

- La coque transparente permet une excellente visibilité des signes cliniques.

- Les crochets permettent de fixer un serre tête sur le masque.

Les masques Quadralite sont adaptables sur tous les insufflateurs, en particulier ceux distribués par Spengler.

## Caractéristiques techniques

## MASQUES DE RÉANIMATION

|                         |                                                |                            |
|-------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Température de stockage | -20°C +50°C                                    |                            |
| Traçabilité             | numéro de lot                                  |                            |
| Stérilité               | produits médicalement propres                  |                            |
| Délai de péremption     | <b>5 ans</b>                                   |                            |
| Matériaux               | lèvre                                          | polypropylène              |
|                         | coque                                          | ThermoPlastique Elastomère |
| Normes applicables      | BS EN ISO 5356-1 : 2004/BS EN ISO 13485 : 2003 |                            |
|                         | BS EN ISO 9001 : 2000/ISO 15223-1 : 2007       |                            |

| Référence      | Coloris | Type de patient                        | Poids du patient | Taille de masque conventionnel |
|----------------|---------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| <b>860 130</b> | gris    | Nouveau-né/nourrisson/enfant           | 0/10 kg          | 0/1/2                          |
| <b>860 131</b> | blanc   | Enfant/petit adulte                    | 10/26 kg         | 2/3                            |
| <b>860 132</b> | jaune   | Petit adulte/adulte moyen/grand adulte | 26/120 kg        | 3/4/5                          |

**Service après-vente Spengler :** pas de service après-vente pour les produits à usage unique.

## CANULES DE GUEDEL

|                         |                                                     |                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Poids                   | 580 841                                             | 14.2246 grammes                                |
|                         | 580 842                                             | 11.8366 grammes                                |
|                         | 580 853                                             | 10.8620 grammes                                |
|                         | 580 854                                             | 6.7723 grammes                                 |
| Température de stockage | -20°C +50°C                                         |                                                |
| Stérilité               | produits médicalement propres                       |                                                |
| Délai de péremption     | <b>5 ans</b>                                        |                                                |
| Matériaux               | corps de la canule                                  | polypropylène                                  |
|                         | bague colorée                                       | extrémité émoussée, ThermoPlastique Elastomère |
| Normes applicables      | ISO 5367 : 2005/EN ISO 13485 : 2003/EN 12181 : 1998 |                                                |
|                         | EN ISO 9001 : 2000/ISO 15223-1 : 2007               |                                                |

## Le choix de la canule :

La taille de la canule correspond pour un patient à la distance entre la commissure labiale et l'angle de la mandibule.

Le standard ISO : la taille des canules oro-pharyngées doit être désignée par la longueur nominale (L) exprimée en millimètres.

| Référence      | Coloris | Type de patient     | Taille ISO | Dimension canule |
|----------------|---------|---------------------|------------|------------------|
| <b>580 841</b> | rouge   | Grand adulte        | 10.0       | 100 mm           |
| <b>580 842</b> | orange  | Adulte moyen        | 9.0        | 90 mm            |
| <b>580 853</b> | vert    | Petit adulte/enfant | 8.0        | 80 mm            |
| <b>580 854</b> | blanc   | Nourrisson/enfant   | 6.5        | 65 mm            |

**Service après-vente Spengler :** pas de service après-vente pour les produits à usage unique.

## La qualité Spengler

## Assurance qualité

Fabrication française certifiée  
ISO 9001 : 2008, ISO 13485 : 2004.

## Marquage CE

Directive européenne CEE 93/42.

Masques de réanimation : classe IIa.

Canules de Guedel : classe I.

## Service après-vente

Pas de service après-vente sur des produits  
à usage unique.

## Garantie

Usage unique.