



**Faites votre choix !**

FORMAT  
NOMADE



**1 Wip'Anios Excel Travel 25**

24 sachets de 25 lingettes  
Taille : 130 x 210 mm  
Texture : 100% viscosse  
Réf. 2617.466



**Wip'Anios Excel 50 et 100**

**2** 12 sachets de 50 lingettes  
Taille : 180 x 200 mm  
Texture : 100% viscosse  
Réf. 2446.424

**3** 6 sachets de 100 lingettes  
Taille : 180 x 200 mm  
Texture : 100% viscosse  
Réf. 2446.655

GRAND  
FORMAT



**4 Wip'Anios Excel 60**

→ 12 sachets de 60 lingettes  
Taille : 240 x 300 mm  
Texture : 100% viscosse  
Réf. 2446.492

**5 Support mural**

> Uniquement pour les Wip'Anios Excel 60  
Réf. 425.185



Le professionnel de la désinfection  
Pavé du Moulin 59260 Lille-Hellemmes - FRANCE  
Tél. +33 3 20 67 67 67 Fax. +33 3 20 67 67 68  
www.anios.com

FR2018 10 - Photos non contractuelles. Dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical de classe IIb. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Produit biocide.

# WIP'ANIOS Excel

Le choix de la **sécurité** et d'un **format adapté**

LINGETTES NETTOYANTES DÉSINFECTANTES



# WIP'ANIOS Excel



Les lingettes WIP'ANIOS EXCEL allient nettoyage et désinfection en une seule opération et permettent d'assurer une hygiène macroscopique et microscopique des surfaces hautes et dispositifs médicaux, à tout moment, dans tous les environnements (bloc opératoire, services de dialyse, environnement proche du patient, cabinet médical, intérieurs de véhicules sanitaires...).

## Lingettes nettoyantes désinfectantes

- Solution d'imprégnation : Surfa'safe Premium.
- Efficacité assurée jusqu'à la date de péremption.
- Conformées à la norme EN 16615 phase 2 / étape 2.

## Prêtes à l'emploi

- Imprégnation uniforme et contrôlée (pas de dilution avec une eau de qualité non maîtrisée).
- Traçabilité assurée.

## Adaptées à tout type de surfaces

- Notamment de générateurs d'hémodialyse, y compris celles pouvant entrer en contact avec des denrées alimentaires (TP2 - TP4).
- Des dispositifs médicaux non immergeables (classe IIb).
- Essuyage des gaines d'endoscopes en traitement préliminaire.
- Haute compatibilité avec un large panel de matériaux.

## Formats adaptés aux différents usages

- Disponibles en sachets.
- 3 tailles différentes.



Pour la sécurité de vos patients, des opérateurs et des équipements.

## UN CHOIX DE TAILLE !

### Wip'Anios Excel Travel 25

FORMAT NOMADE



Taille : 130 x 210 mm  
Texture : 100% viscose

### Wip'Anios Excel 50 ou 100



Taille : 180 x 200 mm  
Texture : 100% viscose

#### IDEALES POUR ...

- **Petits dispositifs médicaux** (capteurs de pression, testeurs de glycémie, tensiomètres, marteaux à réflexes, sondes échographiques classiques)
- **Essuyage des endoscopes** (traitement préliminaire avant désinfection)
- **Surfaces proches du patient** (adaptable, lit, brancard...)

## SECURITÉ GARANTIE



### POUR L'UTILISATEUR

La solution d'imprégnation est formulée :

- Sans substance CMR
- Sans alcool
- Sans parfum

pour **une tolérance et un confort à l'usage.**

### POUR LE MATÉRIEL

Les lingettes sont **imprégnées d'une solution Surfa'safe Premium** : son pH neutre et l'absence d'amphotère assurent une compatibilité optimale avec un large panel de matériaux (métaux, polymères, polycarbonate, aluminium...).

### POUR L'ENVIRONNEMENT

La **viscose 100% biodégradable** des lingettes permet de limiter l'impact sur l'environnement.

## EFFICACITE ANTIMICROBIENNE VALIDÉE

- › Lingettes nettoyantes désinfectantes validées selon la norme EN 16615
- › Solution d'imprégnation bactéricide, fongicide, virucide.

ACTIF SUR	NORMES	TEMPS DE CONTACT
BACTÉRIES	EN 13727	1 minute
	EN16615	2 minutes
	EN 13727 sur ERV, A. baumannii βLSE, E coli OXA 48, E cloacae OXA 48, K pneumoniae OXA 48, SARM	1 minute
	EN 13697 sur ERV, A.baumannii βLSE, E.coli OXA 48, SARM	2 minutes
LEVURES	EN 13624	2 minutes
	EN16615	2 minutes
MOISSISSURES	EN 1275, EN 13624, EN 13697	20 minutes
VIRUS	EN 14476 : Adénovirus, Norovirus Murin	30 minutes
	PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), Vacciniavirus, HSV, Rotavirus	1 minute
	Polyomavirus SV 40	5 minutes

## EXIGEZ LA NORME EN 16615 !

- › La norme d'application phase 2 / étape 2 **EN 16615** (Mai 2015) permet de revendiquer l'activité combinant l'action de la lingette et de la solution en mesurant **l'efficacité bactéricide et levuricide** d'une lingette pré-imprégnée de solution nettoyante désinfectante.

*Condition d'essai : Essai quantitatif de surface avec action mécanique à l'aide de lingettes (essai à 4 zones) en 1 à 5 minutes (ou 60 minutes), à une température comprise entre +4°C et +30°C, dilution en eau dure 30°f pour les produits concentrés et en présence de substances interférentes (CP : 0.3g/L albumine ; CS : 3g/L albumine + 3ml/L d'érythrocytes).*

*Une réduction significative doit être constatée pour revendiquer le statut de « lingette nettoyante désinfectante » : Réduction de 5 log pour les bactéries - Réduction de 4 log pour la levure.*

### Wip'Anios Excel 60

GRAND FORMAT



Taille : 240 x 300 mm  
Texture : 100% viscose

#### IDEALES POUR ...

- **Matériel et dispositifs médicaux**
- Surfaces nécessitant des lingettes de plus **grand format** (Structures externe d'appareil, table d'examen, appareil de dialyse...)



Adaptées notamment aux générateurs d'hémodialyse