

Pharma Pack

Fiche Technique Bouchons 3M 1100



Produit

Bouchons d'oreille de forme conique, conçus pour s'adapter à la plupart des conduits auditifs. Leur surface lisse empêche la salissure d'adhérer et offre une meilleure hygiène. Disponibles avec ou sans cordelette

Norme

Certifiés CE selon la norme NF EN 352-2
Testés par Inspec Laboratories, Salford
Conformes aux exigences essentielles de sécurité de la directive européenne CE/89/686

Indications

Niveaux de bruits dangereux. Idéal pour toutes les fréquences

Composition

Bouchons : Mousse polyuréthane
Cordelette : Polyester

Valeur d'atténuation

SNR* = 37 dB
H = 37 dB, M = 34 dB, L = 31 dB

Mode d'emploi

- * Roulez le bouchon entre vos doigts afin de le comprimer le plus possible.
- * Tirez votre oreille vers le haut et de côté et placez immédiatement le bouchon dans le conduit auditif.
- * Maintenir le bouchon jusqu'à ce qu'il se réexpande.
- * Le bouchon d'oreille est alors correctement placé.

* SNR = Indice Global d'Affaiblissement (Single Number Rating).

H = Valeur d'affaiblissement haute fréquence

M = Valeur d'affaiblissement moyenne fréquence

L = Valeur d'affaiblissement basse fréquence

Département Marchés Hospitaliers
Laboratoires 3M Santé
Boulevard de l'Oise
95029 Cergy Pontoise Cedex
Tél.: 01 30 31 82 82
Fax : 01 30 31 83 83