

ialuset®

cicatrisant à l'acide hyaluronique

Crème cicatrisante et compresse



Qu'est-ce que ialuset® ?

Le produit **ialuset®** est un pansement sous forme de crème ou compresse imprégnée, contenant de l'acide hyaluronique, un constituant naturel de la matrice extra-cellulaire de la peau (au niveau du derme et de l'épiderme), mais aussi de nombreux autres tissus.

L'acide hyaluronique intervient à toutes les étapes de la cicatrisation, de la phase vasculaire inflammatoire en passant par le bourgeonnement, puis la réépithélialisation ⁽¹⁾.

Dans quels cas utiliser ialuset® ?

ialuset® est utilisé dans le traitement des plaies propres aiguës et chroniques. Cicatrisant des plaies suintantes, surinfectées ou non infectées, dont les ulcères de jambe.

L'évolution de la plaie reste à l'appréciation du médecin.

Présentation de ialuset®

ialuset® est un dispositif médical, de classe IIb, remboursé (LPPR), délivré avec ou sans prescription médicale. **ialuset®** se présente sous la forme de crème (tube et flacon pressurisé) et de compresse stérile imprégnée pour une application topique. La prise en charge est assurée pour le traitement non-séquentiel des ulcères de la jambe. Marquage CE 0344.

Fabricant: **Laboratoires Genevrier**

IALUSET® CRÈME

Tube 100 g



Code ACL : **3401076312351**
Code LPPR : **1360350**

IALUSET® COMPRESSE STÉRILE

Taille 10 x 10 cm

Boîte de 10 compresses

Code ACL : **3401076312122**
Code LPPR : **1348550**



IALUSET® FLACON PRESSURISÉ

Tube 100 g

Code ACL : **3401043259573**
Code LPPR : **1335062**

Veuillez vous reporter à la notice du produit pour obtenir des instructions complètes et prendre connaissance des indications, contre-indications, avertissements, précautions et des informations indispensables au bon usage.

Composition de ialuset®

ialuset® crème

Acide hyaluronique (sel sodique) (0,2%). Autres composants : cetearyl glucoside, decylester d'acide oléique, alcool cétéarylique et sodiumlauryl sulfate et sodium cétéaryl sulfate, glycérol, sorbitol liquide, acide sorbique, methyl et propyl parahydroxybenzoate, citrate de sodium dihydrate, eau.

ialuset® compresse stérile

Compresse imprégnée de crème d'acide hyaluronique (sel sodique) 0.05%. Autres composants : macrogol, glycérol, eau.

Mode d'emploi de ialuset®




Nettoyer la plaie selon les méthodes de désinfection habituelles et **rincer** au sérum physiologique



Appliquer sur la plaie la crème en couche épaisse de 2-3 mm ou la compresse



Recouvrir d'un pansement secondaire adapté

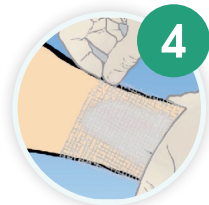

Renouveler. Tout en maintenant la peau alentour, soulever délicatement le pansement. En cas de légère adhésion du pansement avec la plaie, mouiller abondamment avec du sérum physiologique

Précautions d'utilisation de ialuset®

- Respecter les méthodes de nettoyage et de désinfection des plaies et de leur pourtour.
- Compresses stériles à usage unique : ne pas réutiliser pour éviter tout risque de contamination.
- Crème : bien refermer le tube après utilisation. Ne pas appliquer l'embout du tube ou du flacon préssurisé directement sur la plaie.
- Flacon : Avant chaque utilisation éliminer la crème présente à l'extrémité du diffuseur.
- À utiliser dans les 6 mois après ouverture (tube et flacon).
- À conserver à une température inférieure à 25 C.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Contre-indications de ialuset®

- Ne pas utiliser ialuset en cas d'hypersensibilité connue à l'acide hyaluronique ou à l'un des composants de ialuset Crème et Compresse.

Effets indésirables de ialuset®

- Dans de très rares cas, des réactions locales d'hypersensibilité de type eczéma ont été observées.

1.Chen WY, Abatangelo G. Functions of hyaluronan in wound repair. Wound Repair Regen. 1999;7(2):79-89.