

## HydroClean ® advance

### Pansement irriigo-absorbant



| Référence | Taille ou dimensions | Code ACL |
|-----------|----------------------|----------|
| 609662    | Diamètre : 4 cm      | 6004059  |
| 609664    | Ovale : 4 x 8 cm     | 6004061  |
| 609666    | Diamètre : 5,5 cm    | 6004060  |
| 609668    | 7,5 x 7,5 mm         | 6004062  |
| 609672    | 10 x 10 cm           | 6004063  |

#### Produit

Pansement hydrogel irriigo-absorbant, activé par la solution de Ringer pour la détersion des plaies sèches ou exsudatives, infectées ou non. Le pansement est prêt à l'emploi.

#### Indications / Classification

Traitement en milieu humide des plaies, notamment en cas de retard de cicatrisation. HydroClean ® advance convient particulièrement au traitement de plaies chroniques et à cicatrisation difficile lors des phases de détersion et de granulation. HydroClean ® advance peut également être utilisé afin de réactiver les processus de guérison en stagnation qui sont dus à une activité trop élevée des métalloprotéases matricielles.

HydroClean ® advance est un dispositif médical de classe IIb (TÜV-0123).

#### Spécifications

##### Composition :

- Partie centrale absorbante : nontissé constitué d'un superabsorbant en polyacrylate activé par la solution de Ringer, de cellulose et de polypropylène.
- Film protecteur en polypropylène
- Enveloppe : 1 face blanche de jersey en polypropylène sur laquelle ont été apposées des bandes de silicone, 1 face imprimée Hydroclean en voile nontissé de polypropylène hydrophobe recouvrant un film de polypropylène imperméable à l'eau.

Composition de la solution de Ringer :

- Pour 1000 ml :
- Chlorure de Sodium : 8,6 g/l
- Chlorure de Potassium : 0,3 g/l
- Chlorure de Calcium : 0,33 g/l
- Ions :
- Sodium : 147 mmol/l
- Potassium : 4 mmol/l
- Calcium : 2,25 mmol/l
- Chlorure : 56 mmol/l

##### Caractéristiques :

HydroClean ® advance doit être fixé à l'aide d'une bande de fixation sèche ou cohésive type Peha-haft ®, ou d'un sparadrap type Omnifix ® ou d'un film de polyuréthane type Hydrofilm ®.

Renouvellement toutes les 24 à 72 heures.

Réhumidification possible par solution de Ringer (en cas de nécessité d'une humidité importante, lors du retrait ou pour soulager la douleur).



Remboursé LPPR.

Absence de latex.

Absence de phtalates.

Absence de colophane.

## Présentation / Conditionnement

Présentation individuelle sous pochette pelable aluminium, puis en boîte.

Accompagné d'une notice d'emploi.

| Référence     | Taille ou dimensions produit | Nb unités / pochette | Nb pochettes / boîte | Nb boîtes / carton | Nb cartons / palette |
|---------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>609662</b> | Diamètre : 4 cm              | 1                    | 10                   | 6                  | 180                  |
| <b>609664</b> | Ovale : 4 x 8 cm             | 1                    | 10                   | 6                  | 189                  |
| <b>609666</b> | Diamètre : 5,5 cm            | 1                    | 10                   | 6                  | 189                  |
| <b>609668</b> | 7,5 x 7,5 mm                 | 1                    | 10                   | 6                  | 135                  |
| <b>609672</b> | 10 x 10 cm                   | 1                    | 10                   | 6                  | 77                   |

| Référence     | Taille ou dimensions produit | Dimensions pochette | Dimensions boîte  | Dimensions carton  |
|---------------|------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| <b>609662</b> | Diamètre : 4 cm              | 90 x 125 mm         | 127 x 92 x 50 mm  | 285 x 132 x 110 mm |
| <b>609664</b> | Ovale : 4 x 8 cm             | 105 x 150 mm        | 152 x 107 x 52 mm | 230 x 165 x 70 mm  |
| <b>609666</b> | Diamètre : 5,5 cm            | 105 x 150 mm        | 152 x 107 x 52 mm | 230 x 165 x 170 mm |
| <b>609668</b> | 7,5 x 7,5 mm                 | 195 x 125 mm        | 197 x 127 x 57 mm | 264 x 202 x 184 mm |
| <b>609672</b> | 10 x 10 cm                   | 210 x 160 mm        | 214 x 164 x 65 mm | 501 x 225 x 150 mm |

## Stérilisation

A la vapeur.

Durée de vie : 3 ans.

## Contre-indications et précautions d'emploi

Voir la notice

## Conseils d'utilisation

HydroClean ® advance doit être fixé à l'aide d'une bande de fixation sèche ou cohésive type Peha-haft ® ou d'un sparadrap type Omnifix ® ou d'un film de polyuréthane type Hydrofilm ®.

Renouvellement toutes les 24 à 72 heures.

Réhumidification possible par solution de Ringer (en cas de nécessité d'une humidité importante, lors du retrait ou pour soulager la douleur).

Accompagné d'une notice d'emploi.