

## Fiche Technique

Rev. 02 del 26/05/09 - Mod. 71 A1

## PBS 0,6



### Données techniques:

|                                |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Description:</b>            | Collecteur à usage unique pour l'élimination d'objets piquants, coupants et tranchants. Modèle conçu pour les postes à faible production de déchets (plateau de soins, chariot, cabinet médical, au domicile du patient,...) |
| <b>Matériel:</b>               | 100 % polypropylène vierge                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Coloris:</b>                | Collecteur jaune, Couvercle rouge. Matériel coloré avec masterbatch sans métaux lourds. Matériel conforme REACH                                                                                                              |
| <b>Epaisseur:</b>              | Fonds et paroi latérale: 1,9 mm<br>Couvercle et système de fermeture : 1,9 mm                                                                                                                                                |
| <b>Forme:</b>                  | Cylindrique                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Poids:</b>                  | 81gr.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Charge maximale:</b>        | 400gr.                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Capacité nominale:</b>      | 0,600 Lt.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Capacité réelle:</b>        | 0,670 Lt.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Capacité utile:</b>         | 0,536 Lt.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dimensions extérieures:</b> | diam. 100 x 145 mm H.                                                                                                                                                                                                        |



### Logistique:

|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Pcs. / carton</b>              | 100 (collecteurs et couvercles séparés) |
| <b>Pcs. / palette</b>             | 2400                                    |
| <b>Dimensions carton (LxIxH):</b> | 62x41x31 H cm                           |
| <b>Dimensions palette:</b>        | 124x82x220 h cm                         |

### Conformités:

- Conforme à la norme AFNOR NF X-30-500
- Marque NF 302
- Conforme à l'accord ADR
- Certificat UN N. J020466/15
- Kite mark - Conforme à la norme BS 7320
- FDA K071517

Tests réalisés par le Laboratoire National Français LNE

## Instructions

### Montage du couvercle:

Poser le couvercle sur le collecteur et appuyer fortement avec la paume de la main tout autour du couvercle. Des "clic" se font entendre à chaque pression et attestent la fermeture du couvercle



### Fermeture provisoire:

Le collecteur peut être fermé provisoirement en positionnant le bouchon du couvercle avec la partie creuse vers le haut.



A ce stade, la réouverture est possible



### Fermeture définitive:

Le collecteur peut être fermé définitivement en positionnant le bouchon du couvercle avec la partie pleine vers le haut jusqu'à entendre le "clic".



A ce stade, la fermeture est définitive



## Désolidarisation des aiguilles::

Utiliser les encoches à "V" pour désadapter l'aiguille de la seringue et/ou dévisser les aiguilles de prélèvement sous vide

## Désolidarisation des aiguilles à insuline::

Introduire l'aiguille dans l'encoche en marguerite et appliquer sur le stylo un mouvement du bas vers le haut (effet bras de levier) avant de commencer à la dévisser



## Orifice pour l'introduction de déchets:

Orifice de grande taille

## Autoclavage:

Le collecteur peut être autoclavé à 134 ° pendant 18 minutes (certificat LNE disponible sur demande)

## Elimination:

Lors de l'incinération, les collecteurs sont éliminés sans émission de gaz nocifs ni dépôts de métaux lourds

## Supports disponibles:

Support avec pince pour fixer le collecteur PBS 0,6 L sur chariot ou au mur

Plateau de soins avec emplacement pour le collecteur PBS 0,6 L..

Support paillasse à ventouses pour fixer le collecteur PBS 0,6 L



## Informations de sécurité:

Ne pas chercher à récupérer des objets à l'intérieur

Respecter le niveau de remplissage indiqué sur le collecteur: 80 % de la capacité réelle

Utiliser le collecteur uniquement avec le couvercle monté

Ne pas chercher à réouvrir le collecteur fermé définitivement

Le collecteur est à éliminer selon la législation en vigueur

## Avantages:

- Système de fermeture solidaire du dispositif, hermétique et inviolable en fermeture définitive
- Maniable, pratique et facile d'utilisation
- Muni d'une poignée
- Muni d'encoches de désolidarisation permettant de désadapter l'aiguille de la seringue, de dévisser les aiguilles de prélèvement sous vide ainsi que les aiguilles des stylos injecteurs
- Autoclavable selon la norme NFX 30-500)
- Indication du niveau maximum de remplissage
- Fermeture provisoire et définitive
- Supports disponibles

