



www.medline.eu/fr



## Fiche Technique

# Medline Sterile Procedure Nitrile

## Gant d'examen Nitrile, Stérile, Sans Poudre

### Référence(s)

| MDS2294 | MDS2295 | MDS2296 | MDS2297 |
|---------|---------|---------|---------|
| S       | M       | L       | XL      |

### Description

Gant d'examen Nitrile, Stérile, Sans Poudre

### Matière(s) Première(S)

Sans latex  
Nitrile, Stérile, Sans Poudre

### Couleur

Bleu

### Surface

Bout de doigt texturé

### Design Manchette

Bord roulé, manchette pliée pour préserver la stérilité lors de l'enfilage des gants

### Additif chimique (accélérateurs)

Carbamate

### Teneur en poudre (EN455-3)

Teneur en poudre: 0,02 milligrammes par gant

### Epaisseur (basée sur une moyenne)

|               |         |
|---------------|---------|
| Bout de Doigt | 0,14 mm |
| Paume         | 0,11 mm |
| Manchette     | 0,09 mm |

### Conditionnement

50 paires de gants par boîte – 6 boîtes par carton  
Dimensions boîte : 250 mm l x 150 mm L x 135 mm H  
Dimensions carton : 460 mm l x 280 mm L x 260 mm H

### Longueur & Largeur (EN455-2)

| MDS2294 | MDS2295 | MDS2296 | MDS2297 |
|---------|---------|---------|---------|
| 301 mm  | 302 mm  | 302 mm  | 304 mm  |
| 85 mm   | 94 mm   | 106 mm  | 115 mm  |

### Force à la rupture avant vieillissement (EN455-2 ≥ 6 N)

7,8N

Révision: 6

Titre du document : FINT.441 - Technical

Numéro de document : EU1-00004-F-

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Force à la rupture après vieillissement (EN455-2 ≥ 6 N, 7 jours à 70 ± 2 °C dans un four)</b> | 8,3N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Détection des trous (EN 455-1)</b>                                                            | Validé à 1,0 NQA (Conforme selon la norme exigée NQA 1,5) en suivant une procédure d'échantillonnage conforme à la norme ISO 2859-1                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Pénétration Virale</b>                                                                        | Testé et conforme à la norme EN 374-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Résistance Chimique</b>                                                                       | La résistance aux produits chimiques a été évaluée conformément à la norme EN 16523-1 et aux agents de chimiothérapie selon l'ASTM D 6978.<br>Les résultats et recommandations d'utilisation avec les produits chimiques et agents de chimiothérapie peuvent être obtenus sur demande.                                                                      |
| <b>Date d'expiration</b>                                                                         | 35 mois à compter de la date de fabrication<br>Les dates de fabrication et d'expiration sont imprimées sur l'emballage (format AAAA-MM)                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Normes de qualité</b>                                                                         | Dispositif Médical de Classe 1 stérile répondant aux exigences de la Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux 93/42/CEE et la réglementation du Royaume-Uni sur les dispositifs médicaux. Les produits répondent aux exigences des normes européennes harmonisées EN 455-1, 2, 3 et 4. Les sites de production Medline sont certifiés EN ISO 13485 |
| <b>Certification EPI</b>                                                                         | Equipement de Protection Individuelle (EPI) de Catégorie III selon la Directive (EU) 2016/425 tel qu'il a été intégré dans la réglementation du Royaume-Uni et modifié. Conforme aux normes EN 420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5                                                                                      |
| <b>Recommandations de stockage</b>                                                               | A protéger du gel. Eviter la chaleur excessive. A garder au sec. Le produit ne doit pas être en contact direct avec les rayons du soleil, l'éclairage fluorescent, les rayons X, l'humidité et l'ozone.                                                                                                                                                     |
| <b>Pays de fabrication</b>                                                                       | Malaisie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fabricant légal</b>                                                                           | Medline Industries, LP<br>Three Lakes Drive<br>Northfield, IL 60093 États-Unis                                                                                                                                                                                                                                                                              |