

COMED

FICHE TECHNIQUE

STRASBOURG

GARROT HEMOSTATIQUE **Réf. N° : 42 920 40/41/45/46/47/48/49/50**

ET DE SECURITE

faisant partie du dossier
technique

- Classement du dispositif : Classe I
- Durée : Temporaire (règle 1)
- Enregistrement Afssaps : 30.04.2012
- Code GMDN : 16632

Règle appliquée (annexe IX/92/43)

- Non - Invasif
- Non chirurgical
- Actif médical (règle 12)

<i>Mode d'emploi</i>	Dispositif médical utilisé lors de prise de sang pour comprimer les vaisseaux sanguins d'un membre pour arrêter ou atténuer la circulation sanguine. Les conditions de désinfection et utilisation et de stockage influent sur la durée de vie et les caractéristiques des produits caoutchoutés inclus dans les bandes. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier ces paramètres ainsi que l'intégralité des produits associés avant utilisation. Voir cartonnnette pour le descriptif d'utilisation avec schéma à respecter.
<i>Précaution d'emploi</i>	Vérifié avant utilisation que la bande ne présente pas de détériorations ou de coupures. Ne jamais exposer à une température supérieure à 80°C. Respecter le mode d'emploi.
<i>Recyclage/Récupération</i>	Non
<i>DEEE/REACH</i>	Non/Non
<i>PVC/Phtalates</i>	Non/Non
<i>Données de sécurités</i>	Phrases R = Nul Combinaison de phrases = Nul

Description générale	Garrot hémostatique avec stase à bande élastique lavable plusieurs couleurs et longueur, non stérile. Nom commercial = CLIPCOMED PRO							
Pièces jointes	Oui	Photo, dessin technique, cartonnnette						
Référence lot	Non							
Dispositif raccordé	Non							
Dispositif Usage Unique	Non							
Dispositif stérile	Non							
Stérilisation	Non							
Autoclavable	Oui	A 121°C pendant 20 minutes						
Nettoyage	Oui	En machine ou à la main avec un produit nettoyant n'attaquant pas l'ABS, 60°C ou 5 à 10 minutes dans l'eau à ¼ de germicide CLOROX, rincer à l'eau claire et sécher, réalisable une dizaine de fois. Ne jamais mettre le garrot en contact avec des graisses ou huiles (Ex : vaseline, huile de paraffine) ou des solvants organiques tel que benzène, éther, ester et hydrocarbure chloré ainsi que des oxydants (chlore, acide péracétique). Produits non exhaustifs.						
Substance impropre	Produit attaquant l'ABS et le polyamide							
Pièces constitutives	Oui	1 boîtier et fermeture en ABS et une bande élastique						
Matières	Boîtier et fermeture en ABS et une bande en polyamide à 65% et caoutchouc à 35%							
Contient du Latex	Non							
Rohrs	S.O.							
Standard fabrication	S.O.							
Étiquetage	Oui	Cartonnnette explicative						
Emballage	Oui	Unitaire sous blister et carton de 100 pièces						
Stockage particulier	Oui	Ne pas stocker au soleil ou à la chaleur> 50°C						
Durée d'utilisation	Courte temporaire							
Marquage sur le DM	Oui	CE sur la fermeture et logo+ nom sur le boîtier						
Références	42 920 40	42 920 41	42 920 45	42 920 46	49 920 47	42 920 48	42 920 49	42 920 50
Désignation	Garrot hémostatique CLIPCOMED PRO							
Dimensions Longueur (mm)	480	480	480	480	480	480	400	400
Résistance température (C°)	Max = + 40 Min = -10							
Épaisseur (mm)	2.9							
Poids net (g)	33							
Couleurs	rouge	bleu	noir	pourpre	vert	orange	Animaux	Personnages
Élasticité (%)	150 à 200%							
Tension maximale	50N							
Taux de reversions de flexibilité	90%							
Utilisation	Permet le garrotage des veines sanguines							